



FOTELE OKULISTYCZNO-LARYNGOLOGICZNE FO-02 i FL-02



**ŻYWIECKA
FABRYKA
SPRZĘTU
SZPITALNEGO
FAMED S.A.**





Regulacja podgłówek i dźwignia oparcia pleców FO-02



Podpórki rąk (opcja)



Podnóżek do fotela FL-02 (opcja)

DANE TECHNICZNE:

Długość x szerokość siedziska	500 x 540 mm
Regulacja wysokości siedziska FL-02	550 do 750 mm
Regulacja wysokości siedziska FO-02	540 do 740 mm
Kąt odchylenia oparcia pleców od pionu FL-02	90°
Kąt odchylenia oparcia pleców od pionu FO-02	60°
Wysokość oparcia pleców	585 mm
Regulacja wysuwu podgłówek	110 mm
Obrót siedziska	± 90°
Dopuszczalne obciążenie foteli	135 kg
Zasilanie FL-02	230 V, 50/60 Hz
Pobór mocy FL-02	0,2 kW

Wydanie: 4205

Zdjęcia: M. Plewiński, projekt: K. Tkaczyk, Studio Oko, Kraków

Zastrzega się możliwość modyfikacji w wyniku postępu technicznego

FOTELE OKULISTYCZNO-LARYNGOLOGICZNE FO-02 i FL-02 przeznaczone są do ustalania i utrzymania pacjenta w pozycji siedzącej oraz do ustalania pozycji głowy pacjenta podczas badania laryngologicznego lub okulistycznego. Stalowa konstrukcja foteli pokryta jest lakierem proszkowym. Osłony podstawy, oparcia pleców i siedziska wykonane z tworzywa ABS. Tapicerka bezszwowa, siedzisko, oparcie pleców i podgłówek pokryte skajem w bogatej kolorystyce określonej we wzorniku Famed S.A. Fotele posiadają możliwość obrotu siedziska w stosunku do podstawy o 90° (w prawo lub w lewo). Obrót blokowany jest mechanizmem śrubowym. Profilowany podgłówek posiada ręczną regulację wysokości i kąta nachylenia. W fotelu FO-02 regulacja wysokości siedziska realizowana jest nożną pompą hydrauliczną, a odchylenie oparcia pleców wspomagane sprężynami gazowymi z blokadą. W fotelu FO-02 podrażki zamontowane są na stałe (w opcji mogą być odchylane i odejmowane), w FL-02 podrażki są odchylane i odejmowane. Regulacje wysokości siedziska oraz oparcia pleców fotela FL-02 realizowane są siłownikami elektrycznymi z pilota nożnego. Oba fotele mogą być wyposażone w podpórki ręki do krwiodawstwa lub do podawania cytotatyków. Zastosowane materiały tapicerskie, elementy tworzywowe, jak również powłoki ochronne lakierowane i chromowane są łatwe do utrzymania w czystości i mogą być dezynfekowane.

Produkt spełnia wymogi Europejskiej Dyrektywy MDD 93/42/EEC dotyczącej wyrobów medycznych oraz Ustawy o wyrobach medycznych



ŻYWIECKA FABRYKA SPRZĘTU SZPITALNEGO FAMED S.A.

ul. Fabryczna 1, 34-300 Żywiec Telefon: centrala (033) 866 62 00

Fax: (033) 861 48 37, poczta głosowa: (033) 866 63 08

Dział sprzedaży: (033) 866 63 00...02; fax: (033) 861 30 79;

Internet: www.famed.com.pl, e-mail: market.famed@famed.com.pl