



WÓZEK DO PRZEWOŻENIA CHORYCH WP-06



**ŻYWIECKA
FABRYKA
SPRZĘTU
SZPITALNEGO
FAMED S.A.**





WÓZEK DO PRZEWOŻENIA CHORYCH WP-06

Wózek WP-06 służy do przewożenia chorych na sale operacyjne i zabiegowe. Podstawa wózka w kształcie litery C oraz przesuw poprzeczny leża stwarzają dogodne warunki do monitorowania pacjenta aparatem RTG z ramieniem C.

BUDOWA STANDARDOWA:

- Wózek wykonany jest z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym odpornym na ścieranie i środki dezynfekcyjne
- Podwozie zabudowane jest osłonami z tworzywa ABS
- Wózek posiada materac, a dwusegmentowe leże zabezpieczone jest chromowanymi odbojami
- Na osłonie podwozia można umieścić butlę z tlenem. W podwoziu znajduje się także kosz na podręczne rzeczy pacjenta
- Rama leża posiada listwy umożliwiające mocowanie wyposażenia na całej jego długości

DANE TECHNICZNE:

Całkowita długość wózka	2318 mm
Całkowita szerokość wózka	830 mm
Zakres regulacji wysokości leża	575 do 875 mm
Pozycja Trendelenburga	12°
Pozycja anti-Trendelenburga	12°
Zakres regulacji oparcia pleców	0° do 90°
Przesuw poprzeczny	110 mm
Średnica kół	200 mm



Produkt spełnia wymagania Dyrektywy Rady 93/42/EEC dotyczącej wyrobów medycznych oraz Ustawy o wyrobach medycznych



ZALETY WÓZKA:


- Przesuw poprzeczny blokowany jest za pomocą zatrasków
- Duża średnica kół (200 mm) czyni wózek zwrotnym i łatwym w manewrowaniu
- Wszystkie cztery koła blokowane są centralnie. Jedno z kół jest kołem kierunkowym, co ułatwia manewrowanie wózkiem przez jedną osobę podczas jazdy na wprost
- Segment oparcia pleców regulowany jest przy pomocy sprężyn gazowych z blokadą
- Zmiany wysokości leża i przechyłów wzdłużnych Trendelenburga i anti-Trendelenburga realizowane są przy pomocy układu hydraulicznego sterowanego nożnie za pomocą dźwigni umieszczonych od strony głowy pacjenta (opcjonalnie od strony nóg)
- Zakres regulacji umożliwia dostosowanie wysokości leża wózka zarówno do wysokości leża łóżka szpitalnego, jak i blatu stołu operacyjnego



Kosz na podręczne rzeczy pacjenta




Zespół dźwigni pompy nożnej

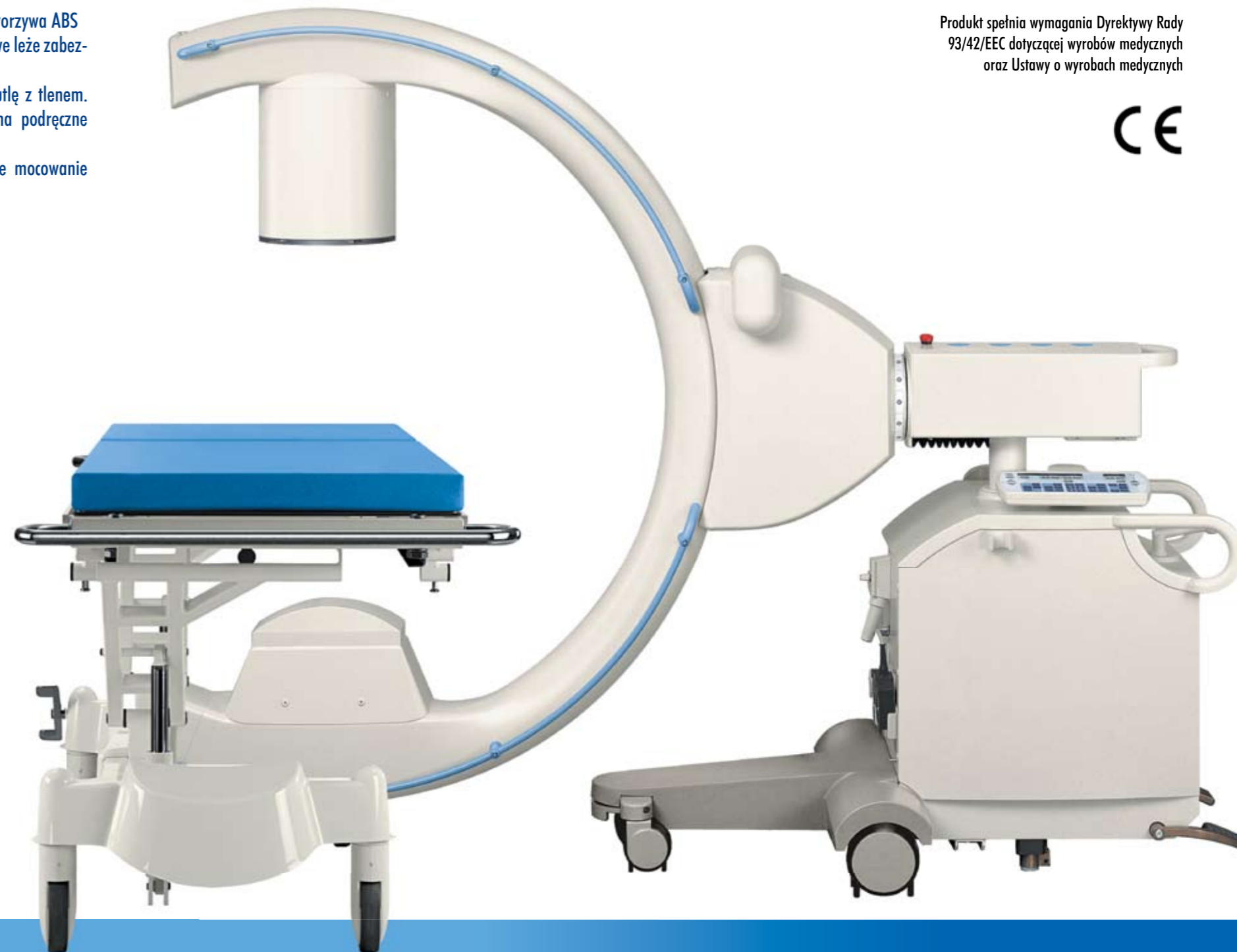

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

- Poręcze boczne
- Wieszaki kroplówek
- Szczyty
- Podpórka kątowa ręki
- Pas do mocowania pacjenta

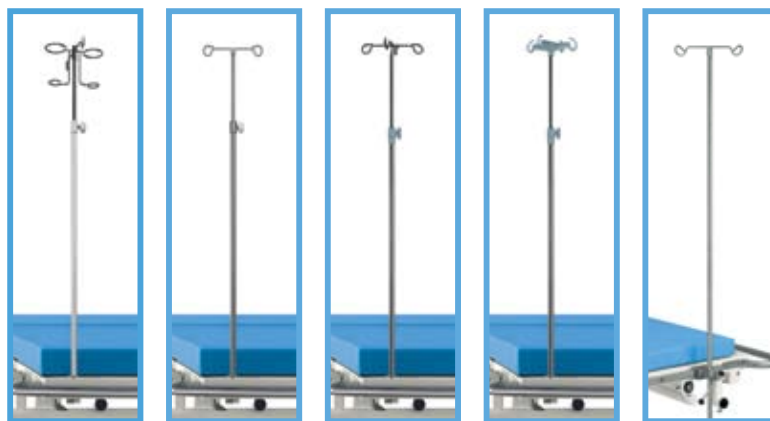

WK-06.1

WK-06.5

WK-16.0

WK-16.1

WK-01.5

Wieszaki kroplówek



PB-15.0

Poręcze boczne lakierowane



PB-15.1

Poręcze boczne chromowane



PB-15.2

Poręcze boczne z elementami poliuretanowymi



Łamany wieszak kroplówki WK-14.0



Szczyt głowy WW-07.0



Szczyt nóg WW-08.0



Pas do mocowania pacjenta
WW-12.0



Podpórka kątowa ręki
WS-07.5 montowana
na listwach bocznych

ŻYWIECKA FABRYKA SPRZĘTU SZPITALNEGO FAMED S.A.

ul. Fabryczna 1, 34-300 Żywiec Telefon: centrala (033) 866 62 00

Fax: (033) 861 48 37, poczta głosowa: (033) 866 63 08

Dział sprzedaży: (033) 866 63 00...02; fax: (033) 861 30 79

Internet: www.famed.com.pl, e-mail: market.famed@famed.com.pl

Wydanie: 0108

Fotografie: M. Plewiński, projekt: K. Tkaczyk, Studio Oko
Zastrzega się możliwość modyfikacji w wyniku postępu technicznego